



AUGMENTEZ VOS CAPACITÉS DE TESTS ANTICORPS **COVID-19**

AVEC LE TEST PANBIO™ COVID-19
IgG/IgM RAPID TEST

RENDRE LE TEST PLUS ACCESSIBLE


- Les anticorps sont importants pour confirmer qu'il y a eu une infection
- Augmentation rapide de votre capacité de tests
- Résultat en 10 à 20 minutes
- Échantillon de sang total capillaire, veineux, sérum ou plasma
- Les tests décentralisés soulagent les hôpitaux surchargés
- Utile en délocalisé, en dehors de l'hôpital et pour les visites à domicile




PROCÉDURE POUR LE PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE

Consulter la notice d'utilisation pour plus de détails.


1 PIQUER AU BOUT DU DOIGT AVEC UNE LANCETTE STÉRILE

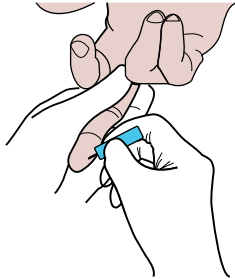

2 AJOUTER 20 µL D'ÉCHANTILLON



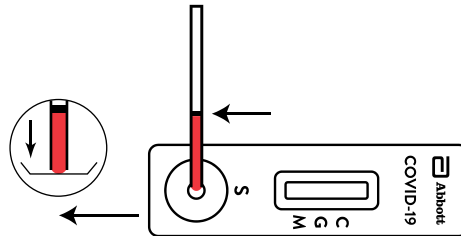


3 AJOUTER 2 GOUTTES DE SOLUTION TAMPON

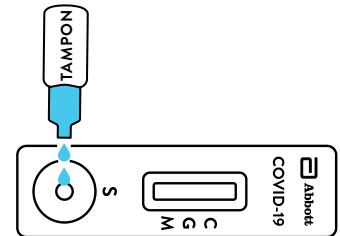

4 LIRE LE RÉSULTAT AU BOUT DE 10 MINUTES

NE PAS LIRE APRÈS 20 MINUTES

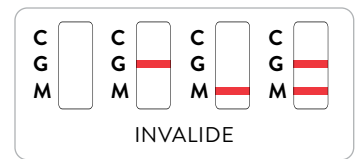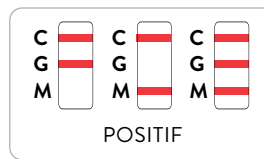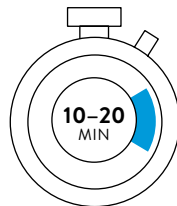

PRINCIPE

UTILISATION PRÉVUE: Test rapide de diagnostic *in vitro* pour la détection qualitative des anticorps IgG et IgM du SARS-CoV-2 dans le sang total, par prélèvement capillaire, veineux, plasma ou sérum humain. Pour un usage professionnel. Doit être utilisé comme une aide dans le cadre du diagnostic du SARS-CoV-2. Peut être utilisé en laboratoire et dans un environnement hors laboratoire en suivant les règles spécifiques indiquées dans la notice d'utilisation et la réglementation locale en vigueur. Ce test apporte des résultats préliminaires. Les résultats négatifs n'excluent pas une infection au SARS-CoV-2 et ils ne peuvent pas être utilisés comme seule base de traitement ou autre prise de décision. Ce test ne doit pas être utilisé en tant que test de dépistage pour le SARS-CoV-2 pour les donneurs.

- **DURÉE DU TEST:** 10–20 minutes
- **CONSERVATION:** 2°C–30°C
- **MARQUAGE CE**
- **TYPE D'ÉCHANTILLON:** Sang total capillaire, veineux, sérum ou plasma
- **TAILLE D'ÉCHANTILLON:**
 - 20 µL pour le prélèvement de sang capillaire ou veineux
 - 10 µL pour le sérum ou plasma

• SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ:

SANG TOTAL CAPILLAIRE

Sensibilité : 96,2 %
Spécificité : 100,0 %

SANG TOTAL VEINEUX

Sensibilité : 96,0 %
Spécificité : 95,8 %

PLASMA

Sensibilité : 97,8 %
Spécificité : 92,8 %

INFORMATION POUR LES COMMANDES

- **NUMÉRO DE PRODUIT:** ICO-T402
- **QUANTITÉ:** 25 tests/kit
- **CONTENU:** 25 Cassettes test, 25 Compte-gouttes, 1 Solution tampon (3 mL), 1 Notice d'utilisation

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE RAPIDE.

Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays. Non validé et non disponible aux États-Unis.
www.poc-covid.abbott